

# MIRA GPS-KLOKKE

Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede frihet, og det skaper trygghet for pårørende og pleiepersonalet.

# MIRA - VAKKER, MODERNE OG FEMININ

Klokken er oppkalt etter kjempestjernen Mira, som har et vakkert rødgult skjær. Klokken er både vakker og feminin, og den demente vil bære den med glede. På denne måten skaper det verdi og trygghet for både pleiepersonale, pårørende og personen med demens.

## PRODUKTEGENSKAPER

Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing	15 sek.
Batteritid	24-45 timer
Mulighet for geofence (ned til)	20 meter
Mulighet for låsbar klokkeirim	Ja
Mulighet for hjemmesone-strømsparer	Ja
Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett	Ja
Vanntett*	IP68*
Mulighet for toveistale	Ja
Lader og ledning til lading medfølger	Ja

\* Du kan ta Mira inn i dusjen eller rengjøre/vaske klokken i lunkent eller varmt vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet i vaskemaskinen eller miste apparatet i toalettet, tåler klokken også dette. Enhetene tåler svømming i enten svømmebasseng eller på stranden i sjøvann.



## VEILEDNING

Klokkeskjermen er i utgangspunktet slått av, men slår seg på når du beveger deg. Hvis du vil aktivere skjermen selv, kan du trykke på en av knappene på siden, eller trykke to ganger direkte på skjermen.

Hvis klokken er tom for strøm, kan den lades ved å sette den i induksjonsladeren som vist her



### SLIK LADER DU KLOKKEN

Hvis det ikke er noe lys på skjermen, er klokken tom for strøm. Sett klokken inn i laderen. En full lading tar omtrent 2,5 timer.

### SLIK SER DU STATUS FOR KLOKKEN

Dobbeltklikk på klokkeskjerm. Du vil nå kunne se klokkes ID-nummer, batterinivå og GPS- og nettverkssignalstatus.

### SLIK SLÅR DU PÅ KLOKKEN

Når du tar ut klokken fra laderen, skal du slå på klokken. Hold inne den nederste knappen til klokken lyser (ca. 5 sekunder).

### SLIK LESER DU KLOKKESLETTET HØYT

Hvis opplesning er aktivert – trykk én gang på en av knappene på siden av klokken.af uret.

### SLIK RINGER DU FRA KLOKKEN-

Trykk på en av knappene på siden av klokken. Bekreft anropet ved å trykke på skjermen. Er klokken satt til å kunne kontakte to telefonnumre, vil knappene være satt til å kontakte hver sitt nummer.

Kontakt Stella Care hvis du vil at klokken skal ringe opp.

\* Vi oppdaterer kontinuerlig funksjoner, ny funksjonalitet, samt instruksjoner på nettstedet vårt. Derfor råder vi deg til å se på [www.stellacare.dk/guidelines](http://www.stellacare.dk/guidelines), for mer informasjon. Noen funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stella Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.



1

### SLIK AKTIVERER DU KLOK- KEMENYEN

For å få tilgang til klokke-  
menyen trykker du 12-6-12-12 på klokken.



2

### NÅR DU HAR AKTIVERT KLOKKEMENYEN

kan du endre klokkeinnstillin-  
gene, slå av eller starte klokken  
på nytt. Du bruker pilene til å  
navigere mellom disse.



3

### DISSE INNSTILLINGENE KAN DU ENDRE

Under elementet Innstillinger  
kan du endre design på urski-  
ven eller aktivere opplesning av  
klokkeslett.



4

### BYTT URSKIVEDESIGN

Bruk pilene for å se de forskjelli-  
ge designvariantene. Når du har  
funnet den designen som passer  
brukeren, trykker du på den, og  
et grønt ikon indikerer at skiven  
er aktiv.



5

### SLIK AKTIVERER DU OP- PLESNING AV KLOKKE- SLETT

Vil du aktivere opplesing  
av klokkeslett, velger du «Opples-  
ning» i menyen. Som standard vil  
opplesning være slått av. Trykk på  
den hvite sirkelen for å aktivere.



## SÅ LETT ER DET

Alt du trenger er en GPS-enhet og appen vår.

- > GPS-enheten bæres av personen med demens.
- > Appen brukes av pleiepersonale eller pårørende.


### HVA GJØR DU HVIS PERSONEN IKKE HAR KOMMET HJEM?

I appen er det en knapp som heter «finn GPS». Trykker du på den, vil personens posisjon vises på et kart. Personens posisjon oppdateres automatisk omtrent hvert 15. sekund hvis du søker etter personen.

### HVORDAN MOTTAR DU INFORMASJON OM ENHETEN?

For å gjøre det enkelt for deg som pårørende eller pleiepersonale kan du se viktig informasjon i appen om GPS-en.

- > Du kan for eksempel se batterinivået og om GPS-en er av eller på.
- > Du kan få en alarm gjennom appen hvis personen er utenfor geofence.

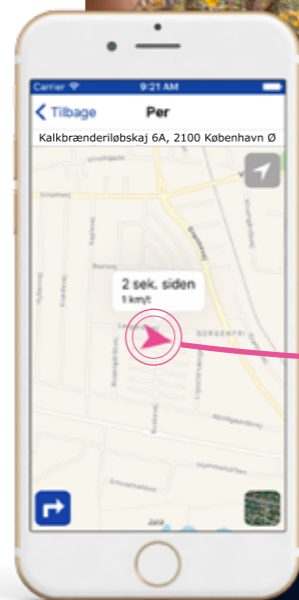

## 3 TING DU MÅ VITE NÅR DU SKAL VELGE SAMARBEIDSPARTNER

### HVOR LENGE KAN DU VENTE FØR DU FÅR EN NY POSISJON?

Jo lengre tid det tar for deg å få en ny posisjon, jo lengre tid tar det før du vet hvor vedkommende er. Hos oss tar det bare sekunder mellom hver ny posisjon når du leter etter en person. Det gjør den fordi hvert sekund er viktig når en person med demens har forsvunnet.

### HVORFOR ER BATTERILEVETIDEN PÅ PRODUKTENE FORSKJELLIG?

Strømforbruket avhenger først og fremst av hvor ofte du ønsker å motta posisjoner fra enheten. Få posisjoner gir lengre batterilevetid, men større risiko for at personen kommer seg langt av gårde uten at noen oppdager det.


### GPS-ENHETER SOM ER VERDIGE Å BRUKE FOR DEMENSRAMMEDE

Våre produkter finnes i mange forskjellige utforminger, for eksempel som armbåndsurs eller som en liten boks. Alle produktene er diskrete og verdige å bære for personen med demens.



## LAST NED OG HENT VÅR "CARE TRACKER" -APP

Når du er logget på appen, vil du se en oversikt over alle de tilkoblede GPS-enhetene dine.

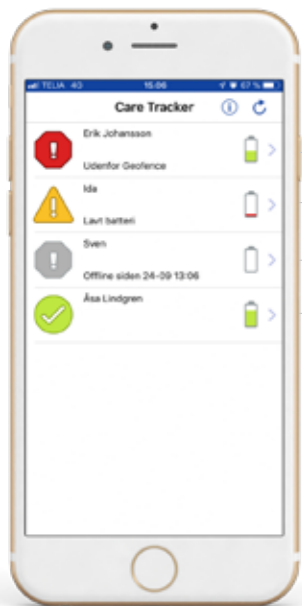

GPS-enheten er utenfor geofence. Angitt med alarmsymbol og teksten "Utenfor Geofence".


Denne GPS-enheten har lavt batterinivå og må lades. Angitt med advarselssymbol og teksten "lavt batteri"

Et grått ikon indikerer at GPS-enheten er slått av eller uten forbindelse.

Kontroller at det er strøm på GPS-en og at den er slått på. Denne GPS-enhetens status er normal. Det er ingenting brukeren trenger være oppmerksom på.

## KOM I GANG MED APPEN

Når du har valgt en GPS-enhet fra listen, har du følgende alternativer.

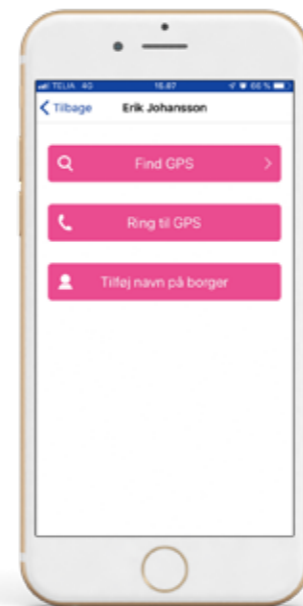

Et kart åpnes, og du kan nå se GPS-enhetens posisjon.

GPS-enheten vil bli oppringt, og den besvarer selv anropet etter at telefonen har ringt et par ganger. Det kan deretter føres en samtale.

Her kan du endre navnet på personen som bærer GPS-enheten.

## FINN GPS

Etter å ha trykket på "Finn GPS", vises et kart. Den rosa pilen viser GPS-sporens posisjon, og klokkeslettet over angir når posisjonen ble sendt. Øverst vises nærmeste adresse.

Den blå prikken viser din egen posisjon.

For å fjerne eller vise den blå prikken trykker du på symbolet øverst i høyre hjørne. Vil du bytte mellom originalt kart eller satellittkart, trykker du på knappen i nedre høyre hjørne.

For å se veibeskrivelser fra deg til GPS-en, trykker du på pilen nederst i venstre hjørne.




## HAR DU VALGT LÅSBAR KLOKKEREIM?

Hvis det er en lås på reima, bruker du et lite verktøy for å åpne spennen. **HUSK** å ta vare på verktøyet. Du kan eventuelt feste den til ladekabelen.




1

Plasser verktøyet løst oppå låsen.

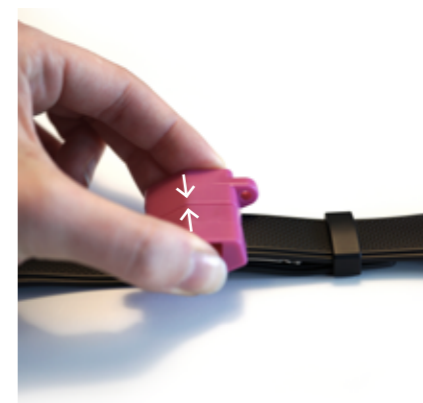

2

Trykk nå forsiktig på verktøyet. Verktøyet har to tapper som må treffe de to hullene på spennen.

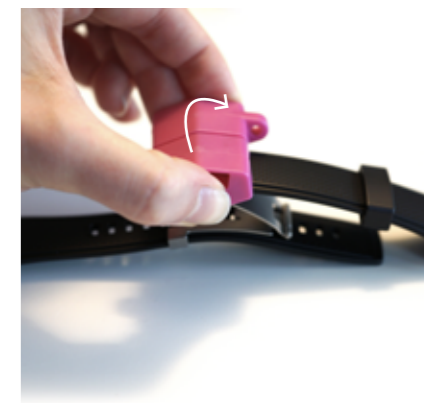

3

Når låsen løsner, kan du løfte låsen opp og ta av klokken.



## STELLA CARE

Vi designer og utvikler systemer som skaper trygghet og frihet  
for personer med demens, pleiepersonale og pårørende.

Vårt oppdrag er å være best i verden til å finne  
folk som er savnet.

Stella Care ApS | Tlf. 42 42 90 60 | [www.stellacare.dk](http://www.stellacare.dk)