

MIRA GPS-KLOCKA

Stella Care skyddar personer med demenssjukdom från att gå vilse. Vi erbjuder ett lokaliseringssystem och GPS-enheter i världsklass. Det ger personer med demenssjukdom frihet och skapar trygghet för anhöriga och vårdare.

MIRA – VACKER, MODERN OCH FEMININ

Klockan är uppkallad efter jättestjärnan Mira, som har ett vackert guldrött sken. Klockan är både vacker och feminin och den demenssjuka kommer att bära den med nöje. På så sätt skapar det värde och säkerhet för både vårdgivare, anhöriga och den demenssjuke.

PRODUKTENS EGENSKAPER

| | |
|---|--------------|
| Tid mellan nya positioner under aktiv spårning | 15 sek. |
| Batteritid | 24-45 timmar |
| Möjlighet till geofence (ner till) | 20 meter |
| Möjlighet till låsbart klockarmband | Ja |
| Möjlighet till strömsparare i hemzonen | Ja |
| Spårning via användarvänlig app på telefon eller surfplattasurfplatta | Ja |
| Vattentät* | IP68* |
| Möjlighet till tvåvägssamtal | Ja |
| Laddare och sladd för laddning ingår | Ja |

* Du kan ta med Mira in i duschen eller rengöra/tvätta klockan i ljummet eller varmt vatten. Skulle du råka stoppa in enheten i tvättmaskinen eller tappa enheten i toaletten så tål även klockan detta. Enheterna tål att simma i antingen en pool eller på stranden i havsvatten.



MANUAL

Klockans skärm är normalt avstängd, men tänds vid rörelse. Om du vill aktivera skärmen själv trycker du på en av knapparna på sidan eller trycker två gånger direkt på skärmen.

Om klockan får slut på ström kan den laddas upp genom att den placeras i induktionsladdaren som visas här



SÅ HÄR LADDAR DU KLOCKAN

Om displayen inte lyser har klockan slut på ström. Sätt klockan i laddaren. En full laddning tar ungefär 2,5 timmar.

SÅ HÄR SER DU KLOCKANS STATUS

Dubbelklicka på klockans skärm. Du kommer nu att kunna se klockans ID-nummer, batterinivå och status för GPS- och nätverkssignaler.

SÅ HÄR STARTAR DU KLOCKAN

När du tar klockan från laddaren ska du starta den. Håll den nedre knappen intryckt tills klockan lyser (ca 5 sek).

HUR KLOCKAN LÄSER UPP TIDEN HÖGT

Om uppläsning är aktiverad – tryck en gång på en av knapparna på sidan av klockan.

SÅ HÄR RINGER DU FRÅN KLOCKAN

Tryck en gång på en av knapparna på sidan av klockan. Bekräfta samtalet genom att trycka på skärmen.

Om klockan är inställd på att kunna kontakta två telefonnummer, kommer knapparna att vara inställda på att kontakta vardera nummer. Kontakta Stella Care om du vill att klockan ska ringa upp.

* Vi uppdaterar kontinuerligt egenskaper, nya funktioner och guider på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du tittar på www.stellacare.dk/vejledninger, för mer information. Vissa funktioner måste aktiveras innan du beställer. Kontakta Stella Care för att få veta mer om våra olika alternativ.



1

SÅ HÄR AKTIVERAR DU KLOCKMENYN

För att komma åt klockmenyn trycker du på 12-6-12-12 på klockan.



2

NÄR DU HAR AKTIVERAT KLOCKMENYN

Här kan du ändra klockinställningar, stänga av eller starta om klockan. Du använder pilarna för att navigera mellan dessa.



3

DESSA INSTÄLLNINGAR KAN DU ÄNDRA

Under inställningar kan du ändra designen på urtavlan eller aktivera uppläsning av tid.



4

ÄNDRA URTAVLANS DESIGN

Använd pilarna för att se olika designers. När du har hittat den design som passar personen trycker du på den och en grön ikon indikerar att urtavlan är aktiv.



5

SÅ HÄR AKTIVERAR DU UPPLÄSNING AV TID

Om du vill aktivera uppläsningen av tid väljer du "Uppläsning" i menyn. Som standard är uppläsning avstängt. Tryck på den vita cirkeln för att aktivera.



SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

Det enda du behöver är en GPS-enhet och vår app.

- > GPS-enheten bärs av personen med demens.
- > Appen används av vårdpersonal eller anhöriga.


VAD GÖR DU OM PERSONEN INTE HAR KOMMIT TILLBAKA HEM?

I appen finns det en knapp som heter "Hitta GPS". Om du trycker på den visas personens position på en karta. Personens position uppdateras automatiskt ca var 15:e sekund om du söker efter personen.

HUR TAR DU EMOT INFORMATION OM ENHETEN?

För att göra det enkelt för dig som anhörig eller vårdgivare ger appen dig möjlighet att se viktig information om GPS:en.

- > Du kan t.ex. se batterinivå och om GPS:en är på eller av.
- > Du kan få larm genom appen om personen är utanför geofence-området.

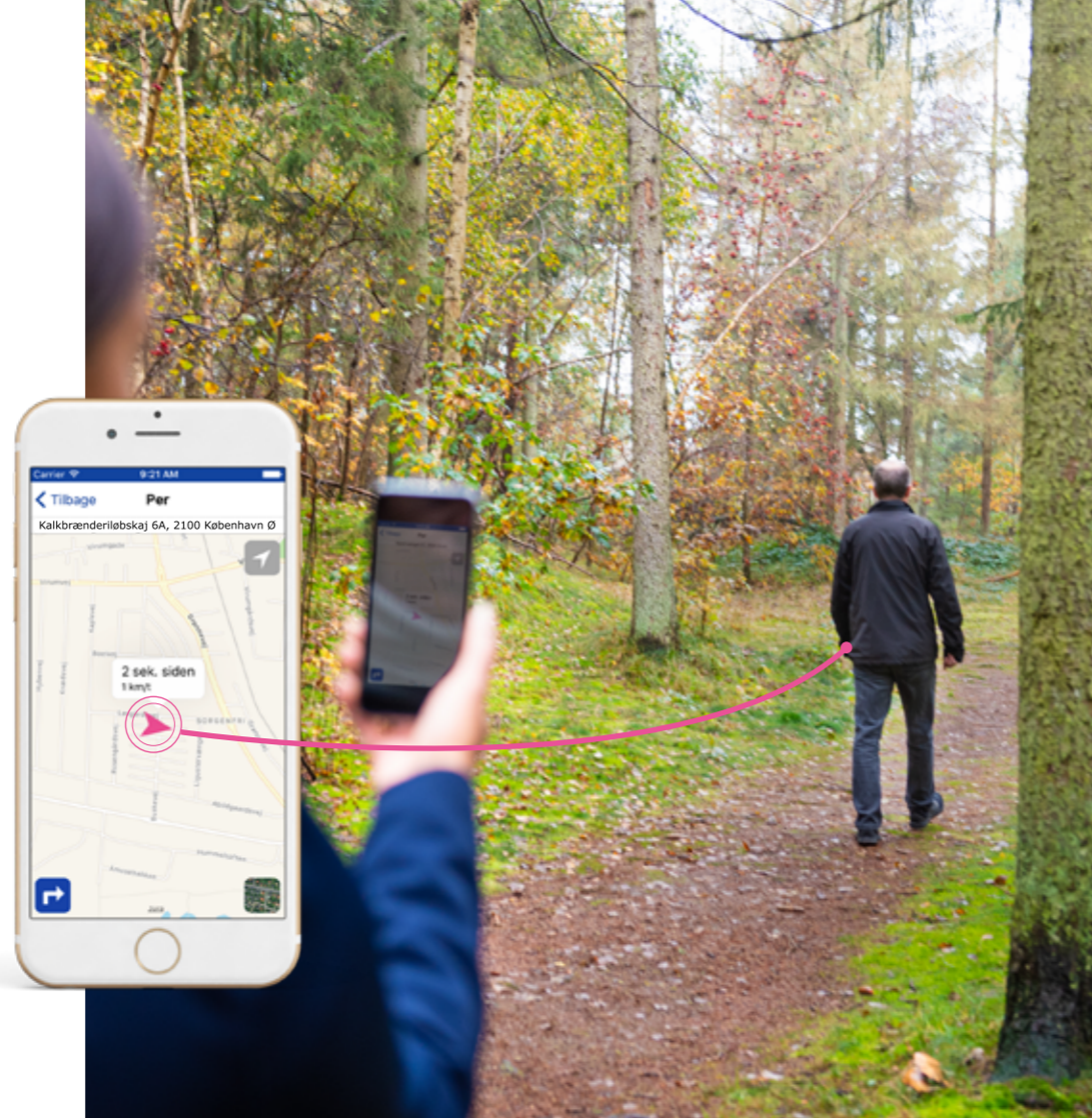

TRE SAKER DU BEHÖVER VETA NÄR DU VÄLJER SAMARBETSPARTNER

HUR LÄNGE KAN DU VÄNTA INNAN DU FÅR EN NY POSITION?

Ju längre tid det går innan du får en ny position, desto längre tid tar det innan du vet var personen är. Hos oss tar det bara några sekunder mellan varje ny position när man söker en person. Det gör det eftersom varje sekund är viktig när en person med demenssjukdom har försvunnit.

VARFÖR ÄR DET SKILLNAD PÅ PRODUKTERNAS BATTERITID?

Strömförbrukningen beror i första hand på hur ofta du vill ta emot positioner från enheten. Få positioner ger längre batteritid, men större risk att personen kommer långt bort utan att någon märker det.


GPS-ENHETER SOM ÄR VÄRDIGA ATT BÄRA FÖR DEN DEMENSDRABBADE

Våra produkter finns i många olika utföranden, till exempel som armbandsur eller som en liten dosa. Produkterna är alla diskreta och värdiga att bära för den demenssjuke.



LADDA NER VÅR APP "CARE TRACKER"

När du är inloggad i appen kan du se en översikt över alla dina anslutna GPS-enheter.

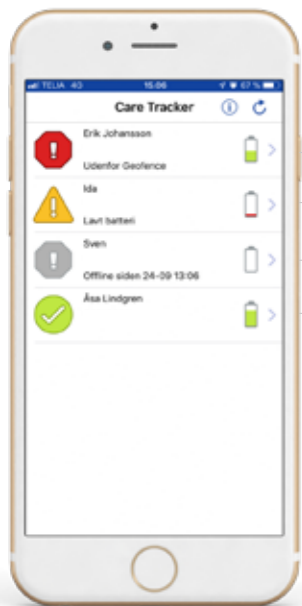

GPS-enheten befinner sig utanför geofence. Anges med larmsymbol och texten "Utanför geofence".


Den här GPS-enheten har lågt batteri och måste laddas. Det indikeras med en varningssymbol och texten "Lågt batteri".

En grå ikon indikerar att GPS-enheten är avstängd eller saknar uppkoppling. Kontrollera att GPS:en har ström och att den är påslagen.

Statusen för den här GPS-enheten är normal. Det är inget som användaren måste vara uppmärksam på.

KOM IGÅNG MED APP'EN

När du har valt en GPS-enhet från listan har du följande alternativ.

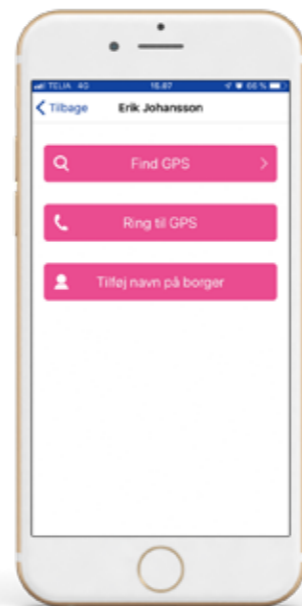

En karta öppnas och du kan nu se GPS-enhetens position.

Ett samtal görs till GPS-enheten, som lyfter luren själv efter att den har ringt en eller två gånger. Därefter kan man prata.

Här kan du ändra namnet på den person som bär GPS-enheten.

HITTA GPS

När du har tryckt på "Hitta GPS" visas en karta. Den rosa pilen visar GPS-spårarens position och tiden ovan anger när positionen skickades. Den närmaste adressen visas överst.

Den blå prickerna visar din egen position. För att ta bort eller visa den blå prickerna, trycker du på symbolen i det övre högra hörnet.

Vill du växla mellan original- eller satellitkarta, trycker du på knappen i det nedre högra hörnet. För att visa en rutt från dig till GPS:en, trycker du på pilen längst ner i vänstra hörnet.




HAR DU VALT DET LÅSBARA KLOCKARBANDET?

Om det finns ett lås på ditt armband ska du använda ett litet verktyg för att öppna spännet. KOM IHÅG att spara verktyget. Du kan eventuellt fästa det på laddningskabeln.



1

Lägg verktyget löst på låset.

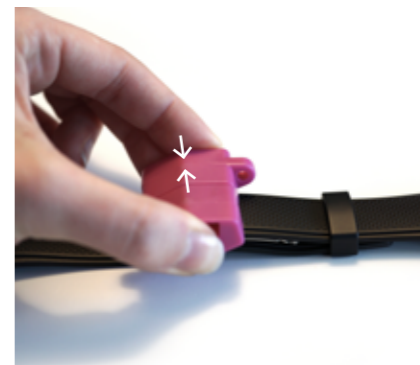

2

Tryck nu försiktigt på verktyget. Verktyget har två piggar som ska in i de två hålen på spännet.



3

När låset öppnas kan du lyfta upp låset och ta av klockan.



STELLA CARE

Vi designar och utvecklar system som skapar trygghet och frihet för personer med demens, vårdpersonal och anhöriga.

Vår mission är att vara de bästa i världen på att lokalisera saknade personer.