

NOVA GPS-KLOCKA

Stella Care skyddar personer med demenssjukdom från att gå vilse. Vi erbjuder ett lokaliseringssystem och GPS-enheter i världsklass. Det ger personer med demenssjukdom frihet och skapar trygghet för anhöriga och vårdare.

KLASSISK ELEGANS OCH MODERN STIL

Klockans formspråk är en perfekt blandning av klassisk elegans och modern stil. Nova är det ultimata valet när du söker en GPS-lösning som kan uppfylla behoven hos både män och kvinnor samtidigt som den på ett unikt sätt kombinerar stil och säkerhet.

PRODUKTENS EGENSKAPER

Tid mellan nya positioner under aktiv spårning	15 sek.
Batteritid	1-5 dagar
Möjlighet till geofence (ner till)	20 meter
Möjlighet till låsbart klockarmband	Ja
Möjlighet till strömsparare i hemzonen	Ja
Spårning via användarvänlig app på telefon eller surfplattasurfplatta	Ja
Vattentät*	IP67*
Möjlighet till tvåvägssamtal	Ja
Laddare och sladd för laddning ingår	Ja

* Du kan ta med Nova in i duschen eller rengöra/tvätta klockan i ljummet eller varmt vatten. Skulle du råka stoppa in enheten i tvättmaskinen eller tappa enheten i toaletten så tål även klockan detta. Enheterna tål att simma i antingen en pool eller på stranden i havsvatten.



MANUAL

Klockskärmen är som standard avstängd. För att aktivera skärmen trycker du på knappen på sidan av klockan. Alternativt kan du ställa in klockan så att skärmen aktiveras genom armrörelse eller att den alltid är på.

Observera dock att detta kan påverka batteritiden. Om klockans batteri har laddats ur, kan du ladda det igen genom att placera klockan i den magnetiska laddaren.

SÅ HÄR LADDAR DU KLOCKAN

Om skärmen inte tänds när du trycker på knappen har batteriet laddats ur. Sätt klockan i laddaren. Laddningen av klockan tar cirka 1 timme och 45 minuter.

SÅ HÄR SER DU KLOCKANS STATUS

Dubbelklicka på klockans skärm. Då visas klockans ID-nummer, nätverksstatus och batterinivå i procent.

SÅ HÄR STARTAR DU KLOCKAN

Klockan startar automatiskt så snart den placeras i laddaren.

HUR KLOCKAN LÄSER UPP TIDEN HÖGT

Vill du göra ändringar av klockans inställningar, t.ex. för att ändra urtavla, larmknapp eller liknande, måste du öppna administrationssystemet.


SÅ RINGER DU FRÅN KLOCKAN ELLER AKTIVERAR LARMANROP

Tryck en gång på knappen på sidan av klockan. Bekräfta samtal/larmanrop genom att trycka på skärmen.

Larmmottagarna kommer nu att få meddelande om larmanrop via appen.

Om enheten är inställd för att starta ett samtal ringer enheten upp efter bekräftelsen på skärmen.

* Vi uppdaterar kontinuerligt egenskaper, nya funktioner och guider på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du tittar på www.stellacare.dk/vejledninger, för mer information. Vissa funktioner måste aktiveras innan du beställer. Kontakta Stella Care för att få veta mer om våra olika alternativ.

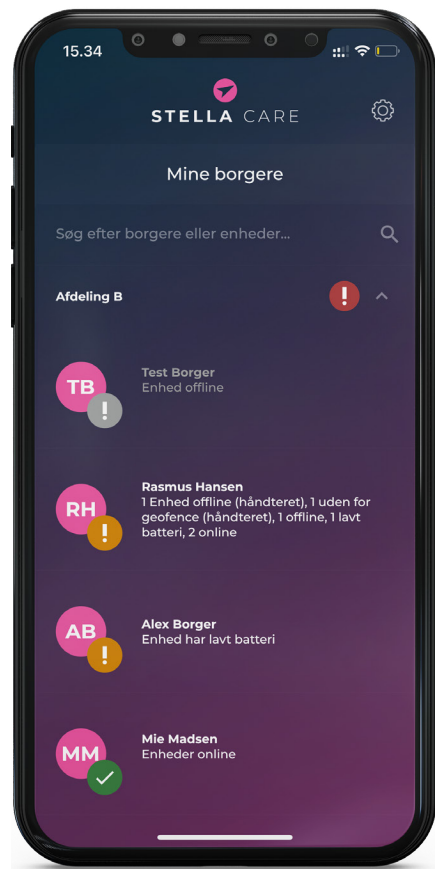

SÅ HÄR ANVÄNDER DU APPEN

Det enda du behöver är en GPS-enhet och vår app.


GPS-enheten bärs av personen med demens.
Appen används av vårdpersonal eller en anhörig.

Ladda först ner vår app från App Store eller Google Play.
Sök efter **"Stella Care"** och välj appen **"Stella Care"**.

När du är inloggad i appen får du en översikt över de användare som du har tillgång att följa. De flesta användare har bara en enhet, men vissa har flera. Du kan använda sökrutan för att söka efter användare om du har tillgång till flera användare.

Förteckningen över användare är sorterad efter kritiskhet.

- Röd – Geofence-larm
- Grå – Offline
- Gul – Batterilarm
- Grön – Allt är ok

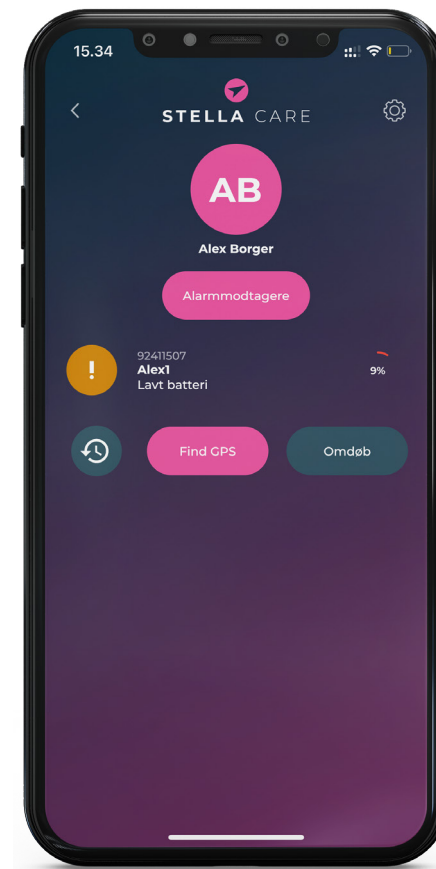


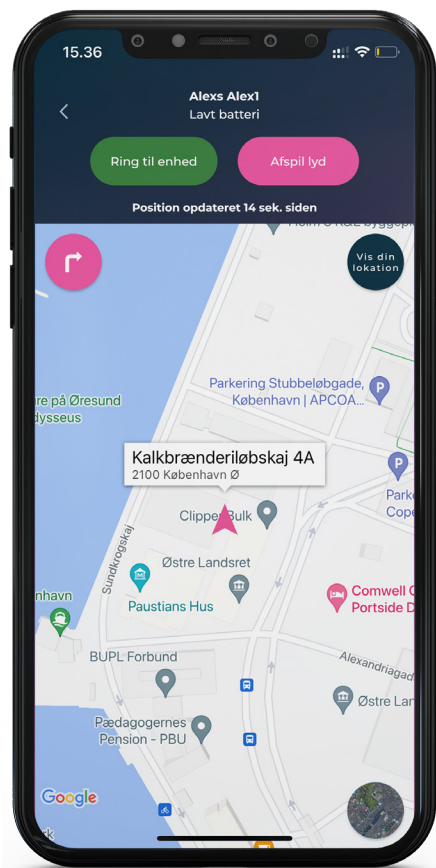
SÅ HÄR HITTAR MAN EN ANVÄNDARE

Välj den användare som du vill hitta i den föregående listan.
Du ser nu en översikt över användarens enheter.

Tryck på den av användarens enheter som du vill hitta.

DU HAR NU MÖJLIGHET ATT:

- > **Visa enhetens historik** – Om du trycker på ikonen  kommer det att vara möjligt att visa en historik över larm och samtal till och från enheten.
- > **Hitta GPS** – Här kan du se GPS-enhetens aktuella position på en karta. Användarens position uppdateras automatiskt var 15:e sekund om du söker efter användaren.
- > **Byta namn** – Under "Byt namn" har du möjlighet att ändra enhetens namn. Till exempel Natt och Dag.
- > Längst till höger kan du se hur mycket batteri enheten har i procent.
- > Under varje enhet visas enhetens ID-nummer och status, t.ex. geofence, lågt batteri, OK eller offline.
- > Om det finns flera personer som får larm för användaren har du möjlighet att se vem som är registrerad som larmmottagare genom att trycka på **"larmmottagare"**.



SÅ HÄR SER MAN ANVÄNDARENS POSITION PÅ EN KARTA





Om du vill se enhetens position på en karta trycker du på Hitta GPS.


När du har tryckt på "Hitta GPS" i översikten över användarens enheter kommer du att få en karta som visar var användaren/enheten befinner sig.

Överst på sidan visas användarens namn, enhetens status och när enheten senast skickade sin position till systemet. Genom att trycka på knappen "Ring till enhet" startas ett samtal till användarens enhet. Enheten kopplar själv fram samtalet.

Om du har problem med att hitta enheten kan du trycka på knappen "Spela upp ljud" så spelar enheten upp ett ljud i 20 sekunder så att den kan hittas igen.

PÅ KARTAN HAR DU FÖLJANDE MÖJLIGHETER

-  Se din egen position på kartan. Den blå prick visar din position.
-  Tryck på denna för att se användarens aktuella adress/plats.
-  Här kan du växla mellan vanlig karta och satellitkarta.
-  Tryck på den här knappen för att guida dig till enhetens position.

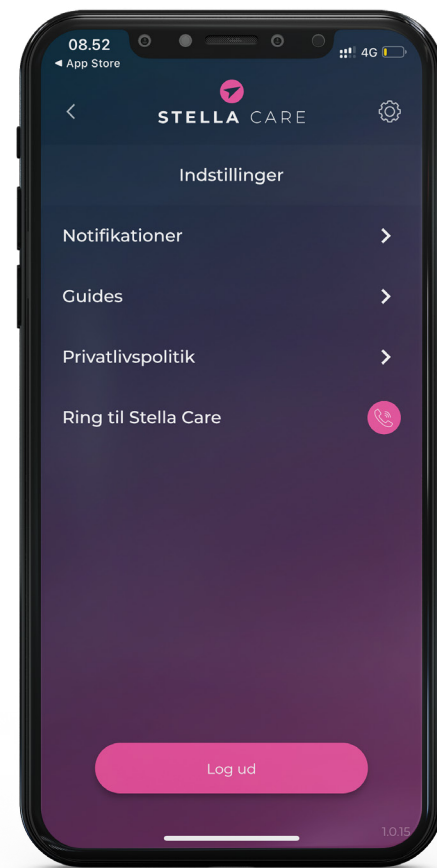

SÅ HÄR ÄNDRAR DU DINA INSTÄLLNINGAR

I appen kan du göra ett antal inställningar för ditt konto.

- > **Meddelanden** – Här kan du aktivera och avaktivera vibration och ljud vid larm eller ändra ljudet för de olika larmen.
- > **Guider** – Om du är osäker på hur du ska använda enheten, appen eller administrationssystemet, hittar du vägledning om hur du gör detta här.
- > **Integritetspolicy** – Läs om integritetspolicyen för användning av appen.
- > **Ring Stella Care** – Om du har problem med appen eller har några frågor, kan du alltid kontakta oss genom att trycka här. Vår kundtjänst är öppen dygnet runt, året runt.


HAR DU VALT DET LÅSBARA KLOCKARMBANDET?

Om det finns ett lås på ditt armband ska du använda ett litet verktyg för att öppna spännet.
KOM IHÅG att spara verktyget. Du kan eventuellt fästa det på laddningskabeln.




1

Lägg verktyget löst på låset.

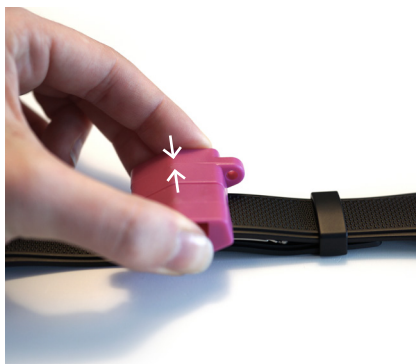

2

Tryck nu försiktigt på verktyget.
Verktyget har två piggar som ska
in i de två hålen på spännet.

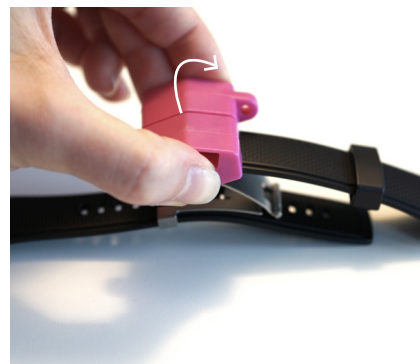

3

När låset öppnas kan du lyfta upp låset
och ta av klockan.



STELLA CARE

Vi designar och utvecklar system som skapar trygghet och frihet för personer med demens, vårdpersonal och anhöriga.

Vår mission är att vara de bästa i världen på att lokalisera saknade personer.